


AUWC

Adjustable Universal Wheelchair Connector




AUWC - Adjustable Universal Wheelchair Connector

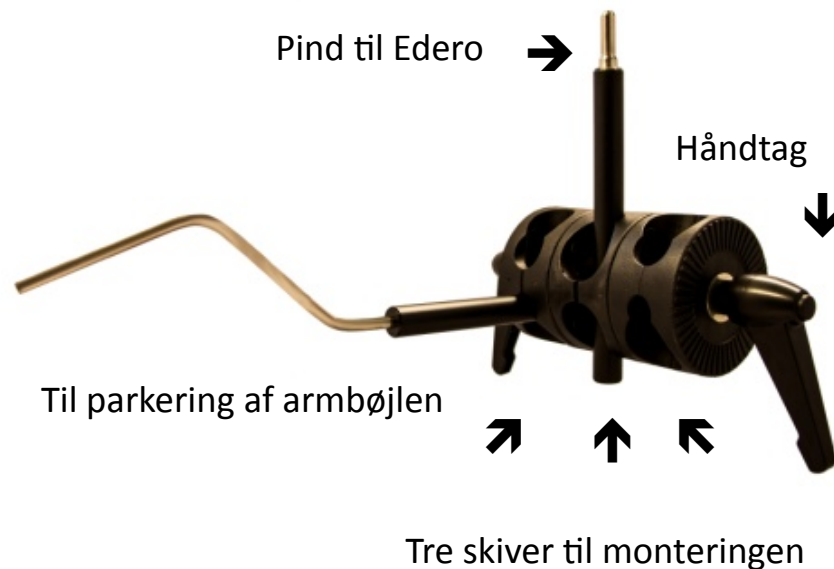

Med AUWC kan du nemt montere en Edero på en manuel kørestol. Andre typer af stole er også muligt, så længe de har lignende lodrette rør bag ryglænet, som du kan montere AUWC på.

AUWC består af tre skiver, der kan drejes uafhængigt af hinanden. Med håndtaget kan du fastgøre og løsne diskene. Håndtaget kan erstattes af en M8 bolt.


Skiverne kan fastspændes til rør med forskellige diametre. En standard skives diameter er : \varnothing 18 - 22- 27 og 28 mm.

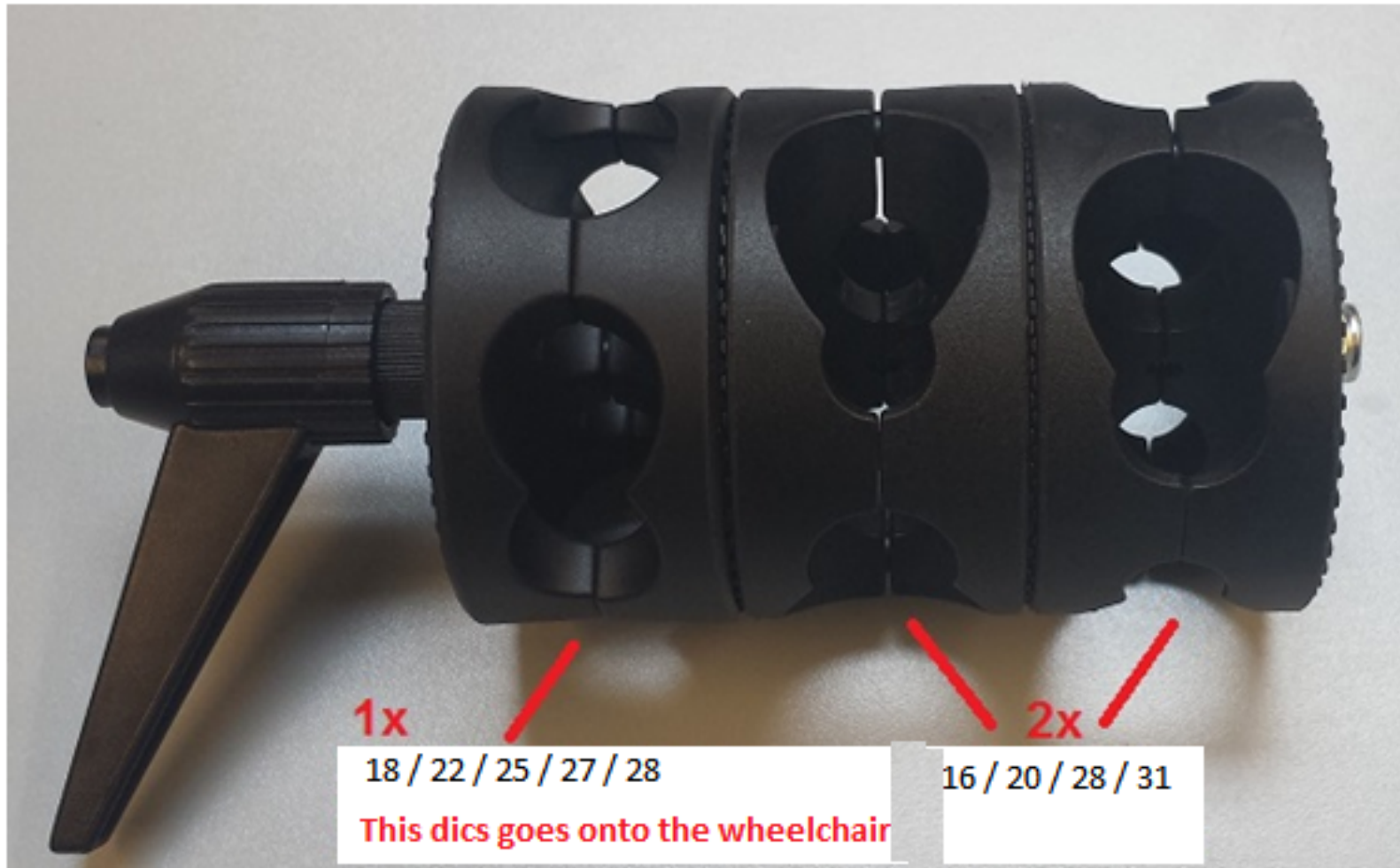



Spænd en af skiverne fast omkring det lodrette rør på ryglænets ramme

- Løsn skiven med bolten eller håndtaget.
- Placér den yderste skive omkring røret og spænd fast.

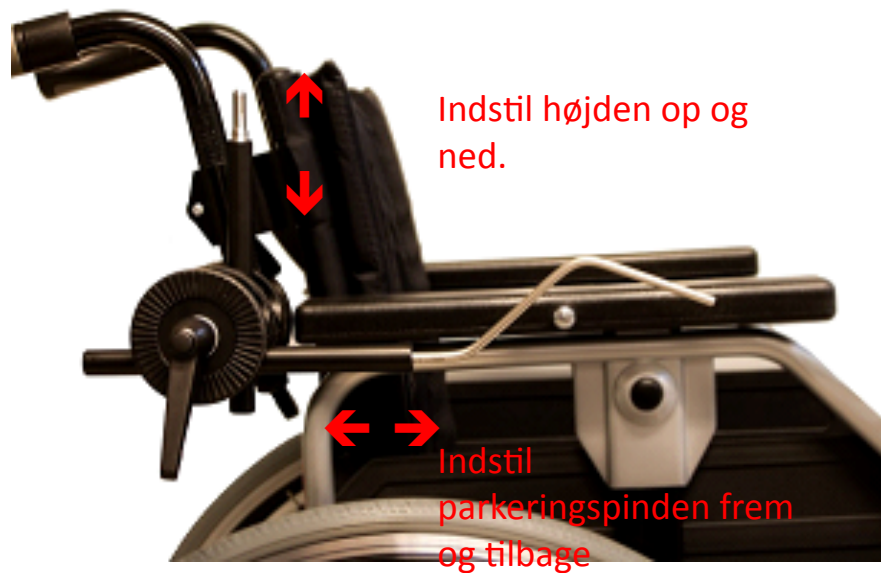

- Du kan justere armstøtten i højden til brugeren med den lodrette pind, hvor Ederoen er placeret på.
- Parkeringsdelen kan justeres frem og tilbage, ved at løsne skiverne.