

Vejledning til Bestic

Et spisehjælpemiddel
Bestic software version 2.3 -



Indholdsfortegnelse

1. Introduktion	4
1.1 Anvendelse	4
1.2 Filosofien bag Bestic	4
1.3 Kontaktoplysninger	4
2. Sikkerhed	4
2.1 Oplysninger om advarselssymbolet	4
2.2 Ansvarsfraskrivelse	5
2.3 Sikkerhedsinstruktioner	5
3. Produktoversigt	6
3.1 Beskrivelse	6
4. Håndtering	7
4.1 Løft Bestic	7
4.2 Tilslutning af en betjeningsenhed	7
4.3 Opladning	8
4.4 Montering og afmontering af skeen	8
4.5 Tallerken	8
4.6 Tænd og sluk Bestic	9
4.7 Nødstop	9
4.8 Nulstilling	9
4.9 Genstart ikke	9
5. Vedligeholdelse	9
5.1 Rengøring	10

6. Transport og opbevaring	10
6.1 Pakning til transport	10
6.2 Opbevaring	10
7. At spise med Bestic	11
7.1 Start	11
7.2 Startmenu	11
7.2.1 Startmenu –med kun én bruger	11
7.2.2 Startmenu – med flere brugere/profiler	12
7.3 Betjeningstilstande	13
7.4 Skift mellem forskellige betjeningsenheder/betjeningstilstande	15
8. Menuer og indstillinger	15
8.1 Symboler og forkortelser i menuerne	16
8.2 Hovedmenuen	17
8.2.1 Personlige indstillinger	18
8.2.2 Generelle indstillinger for Bestic spisehjælpemiddel	21
8.3 Bogstaver, tal og specialtegn	23
8.3.1 Redigering og tilføjelse af brugere	23

Bilag

Bilag 1 – Sådan anvendes betjeningsenheden Bestic Picasso MINI	24
Bilag 2 – Serveringstips	25
Bilag 3 – Bemærkninger til personlige indstillinger	26
Bilag 4 – Andre bemærkninger	27
Bilag 5 – Korrekt indsæt af USB og afmontering af skeen	28

1. Introduktion

1.1 Anvendelse

Bestic er et spisehjælpemiddel beregnet til personer med nedsat funktionsevne i arme eller hænder. Brugeren styrer selv hjælpemidlet ved hjælp af en af flere typer betjeningsenheder. Bestic er oprindeligt udviklet som et dagligt hjælpemiddel ved måltiderne. Den skal placeres, så den står stabilt på et plant underlag, f.eks. et bord, når den er i brug. Bestic kan bruges af både voksne og børn, men den er ikke beregnet som et legetøj.

1.2 Filosofien bag Bestic

Bestic er designet til brug af personer med ufrivillige armbevægelser og personer med ingen eller begrænset funktion i arme eller hænder. Bestic styres af brugeren, som selv vælger, hvilken bid af maden, der løftes op til munden og hvornår. Da behovet for hjælp er individuelt, er det muligt at tilslutte forskellige typer betjeningsenheder, der passer til brugerens kompetencer. Tanken er, at det skal kræve så lidt anstrengelse som muligt at spise, og at brugeren selv skal kunne bestemme, hvilken bid af maden han/hun vil spise hvornår. Bestic afventer brugerens ordrer og bevæger sig ikke, før brugeren afgiver den næste kommando.

1.3 Kontaktoplysninger

Bestic er en medicinsk anordning i klasse I, er CE-mærket og fremstilles af Bestic AB i Stockholm i Sverige. Du kan finde oplysninger om lokale kontaktpersoner og service i dit land på vores websted (www.besticinc.com).

2. Sikkerhed

Det er vigtigt, at du læser dette kapitel grundigt og forstår det, før du begynder at bruge Bestic.

2.1 Oplysninger om advarselssymbolet

Dette symbol angiver en advarsel. Hvis symbolet vises ved siden af en tekst, betyder det, at der er risiko for personskade eller risiko for skader på Bestic, hvis advarslen tilsidesættes.



2.2 Ansvarsfraskrivelse

Bestic AB kan ikke holdes ansvarlig for skader forårsaget som følge af forkert brug. Hjælpemidlet må kun anvendes af personer, der er blevet informeret om og instrueret i brugen af hjælpemidlet. Hjælpemidlet skal anvendes i overensstemmelse med anvisningerne i denne brugervejledning. Bestic AB forbeholder sig retten til at ændre Bestics specifikationer uden varsel.

2.3 Sikkerhedsinstruktioner

Vurdér altid hvad brugerens sundhedstilstand kræver og hvordan diagnosen påvirker spisesituationen, navnlig vedrørende risikoen for kvælning. Der er ingen forhøjet risiko for kvælning ved brug af Bestic sammenlignet med at få hjælp til at spise af anden person.




Følg nedenstående sikkerhedsinstruktioner:

1. Sørg for, at du har forstået alle anvisninger og advarsler, før du tilslutter Bestic og begynder at bruge den.
2. Tallerkenen skal stå til venstre for Bestic, når teksten i displayet vender mod brugeren. Tallerkenen skal være placeret på en skridsikker måtte så tæt på Bestic's 'fødder' som muligt.
3. Skru ikke skruerne ud af Bestic. Forsøg ikke at åbne Bestic. Kontakt servicerepræsentanten, hvis der er behov for service.
4. Bestic må ikke overhældes med eller nedsænkes i væske.
5. Rør ikke ved ledningen eller stikkontakten med våde hænder.
6. Anbring Bestic på et plant og stabilt underlag. Sørg for at Bestic står stabilt og ikke risikerer at vælte.
7. Slut kun den medfølgende AC-oplader til Bestic. Forsøg ikke selv at modificere AC-oplader.
8. Træk ikke i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten, men tag fat om selve stikket.
9. Vær opmærksom på klemningsfare. Når Bestic er i bevægelse, er der risikoområder omkring leddene.
10. Sørg for, at temperaturen omkring Bestic ikke overstiger +40 °C. Efterlad ikke Bestic i direkte sollys eller i bagagerummet på en bil på en sommerdag.
11. Anbring ikke skrøbelige genstande i nærheden af Bestic, da de kan vælte eller beskadiges af armens bevægelser. Vær særligt forsigtig med stearinlys.
12. Kom ikke Bestic i opvaskemaskinen.
13. Transporter ikke Bestic i en taske med hjul, da rystelserne kan beskadige hjælpemidlet.
14. Alle manøvreknapper og kontakter skal være taget ud af Bestic under transport for at undgå at Bestic tænder.
15. Hvis Bestic ikke længere fungerer normalt eller opfører sig på en uventet måde, skal du slukke Bestic, fjerne opladeren og kontakte servicerepræsentanten.

3. Produktoversigt

3.1 Beskrivelse


Oversigt:

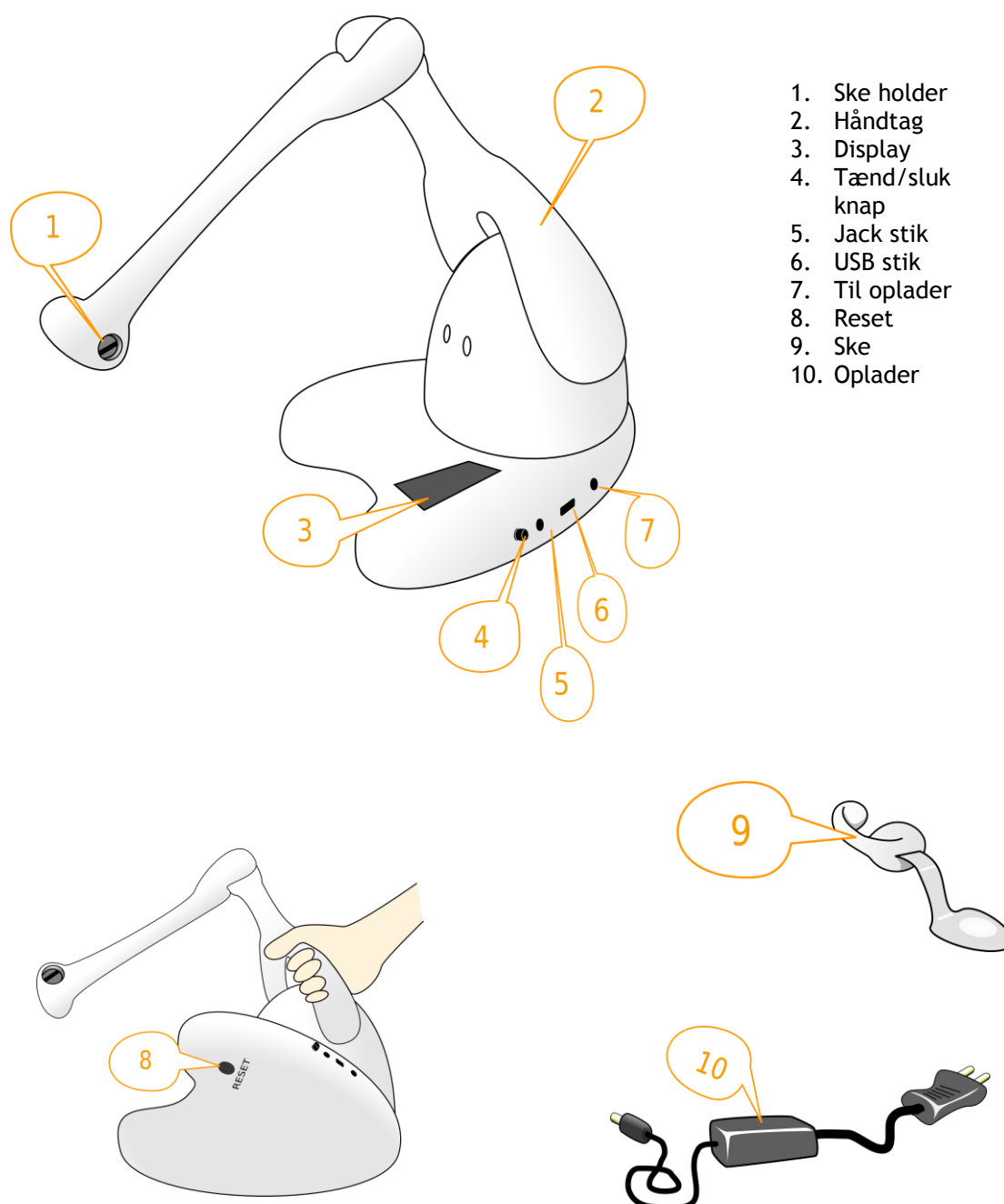

4. Håndtering

4.1 Løft af Bestic

Når du løfter Bestic, skal du bruge det indbyggede håndtag i den nederste, tykke del af armen.
Se billedet.

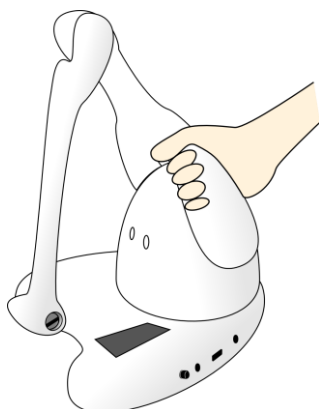

Løft ikke Bestic i den tynde,
øverste del af armen.



4.2 Tilslutning af en betjeningsenhed


Bestic kan kun sluttes til *godkendte* og *validerede* betjeningsenheder.
Hvis hjælpemidlet sluttes til en betjeningsenhed, som ikke er valideret,
er der risiko for elektrisk interferens eller skader.
Du kan finde en komplet og opdateret liste på vores
websted www.besticinc.com.



Der er to typer stik til tilslutning af en betjeningsenhed på Bestic:

5. Jack-stik
6. USB

Typen af stik afhænger af, hvilken betjeningsenhed du bruger. Der er følgende stik på siden af Bestic:

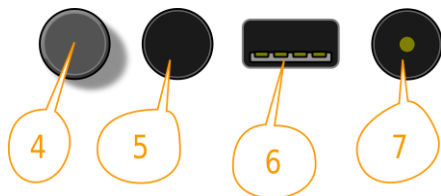

4. Tænd/sluk-knap
5. Jack-stik (tilslutningsstik)
6. USB-port (tilslutningsstik)
7. Tilslutningsstik til AC-oplader


(Ovenstående numre svarer til de samme numre på side 6).

4.3 Opladning

Bestic indeholder et batteri, som skal oplades. Hvis Bestic ikke kan tændes, eller hvis displayet viser, at batteriet skal oplades, skal du tilslutte AC-opladeren. Du kan til enhver tid tilslutte eller frakoble AC-opladeren. Når AC-opladeren er tilsluttet, oplades batteriet automatisk. Det tager ca. 3 timer at oplade et helt afladet batteri. Hvis du anvender hjælpemidlet, mens batteriet oplades, kan det tage længere tid, før det er fuldt opladet.

4.4 Montering og afmontering af skeen

Montering af skeen: Start med at fastgøre den forreste del af skeen på Bestic og klik derefter den bageste del af skeen fast. Det er lettest at på- og afmontere skeen, når Bestic's 'arm' er oppe i vandret position.

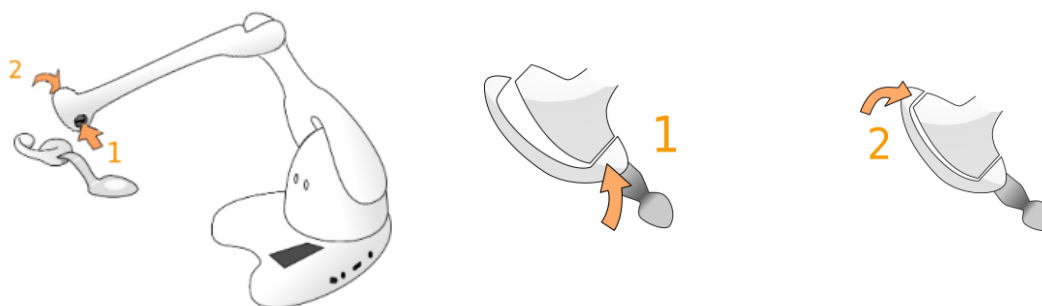


Afmonter skeen ved at trykke skeens holder ind mod Bestic, så den bagerste del løsnes og du forsigtigt kan trække skeen helt af.



4.5 Tallerkenen

Brug den tallerken, der følger med Bestic, for at sikre bedst mulig hjælp til spisning. Tallerkenen er nøje udvalgt, fordi den har en kant, som gør det lettere at skubbe maden op på skeen. Tallerkenens diameter stemmer også overens med Bestics bevægelser.

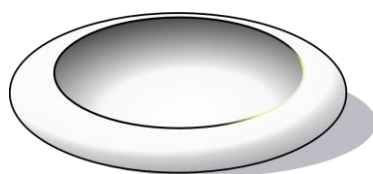

4.6 Tænd og sluk Bestic

Bestic tændes og slukkes ved at trykke på den sorte tænd/sluk-knap. Når du trykker på den sorte tænd/sluk-knap...

- ÉN GANG, stopper Bestic med det samme på det sted, hvor den er, og begynder at lukke ned.
- TO GANGE* (inden for fem sekunder, og mens displayet lyser med teksten "Bestic slukker"), folder Bestic sammen til transport position.
- TRE GANGE* (inden for fem sekunder, og mens displayet lyser op med teksten "Bestic folder sammen"), stopper Bestic på det sted, hvor den står.
- I MINDST 2 SEKUNDER, får du mulighed for at åbne hovedmenuen (se afsnit 8.2. Hovedmenu). Denne handling vil også få skeen/armen til at stoppe.

*Bestic kan kun gå til transport position, når den er i spisetilstand. Dette skal forhindre, at armen bevæger sig under transport. Derfor gælder ovenstående instruktion om at trykke to gange og tre gange kun, når Bestic er indstillet til spisetilstand.

Du kan til enhver tid slukke for Bestic, uanset hvilken menuindstilling der vises i displayet, eller hvis Bestic er indstillet til spisetilstand.

4.7 Nødstop


Nødstop udføres ved at slukke Bestic på normal vis på tænd/sluk knappen.

4.8 Nulstilling

Hvis Bestic ikke reagerer på kommandoer eller opfører sig unormalt, kan det være en hjælp at nulstille den. Tryk på nulstillingsknappen i bunden af Bestic ved at stikke spidsen af en papirclips ned i hullet ved siden af teksten "Reset".

4.9 Genstart ikke

Hvis displayet viser følgende tekst:

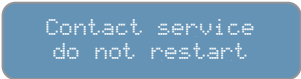

Contact service
do not restart




FORSØG IKKE at genstarte eller nulstille Bestic. Træk stikkene til alle betjeningsenheder og AC-opladeren ud, og kontakt din lokale salgsrepræsentant på: www.besticinc.com/contact/distributors

5. Vedligeholdelse

Sådan vedligeholdes Bestic.

5.1 Rengøring

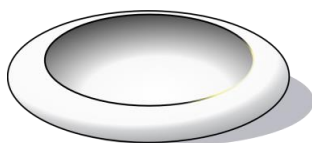

1. Sørg for at Bestic er slukket.
2. Frakobl AC-opladeren og betjeningsenheden.
3. Skeen, skeholderen og tallerkenen kan vaskes op i hånden eller i opvaskemaskine.
4. Rengør selve hjælpemidlet, AC-opladeren og betjeningsenheden med en **fugtig klud med lidt opvaskemiddel eller alkohol**. Brug ikke skrappe rengøringsmidler, opløsningsmidler eller skuremidler. Brug en blød børste efter behov .

6. Transport og opbevaring

6.1 Pakning til transport

Når hjælpemidlet skal transporteres, skal du sørge for, at den bliver slukket i sammenfoldet position, så den er kompakt og dermed velegnet til transport. For at sammenfolde Bestic til transport, læs paragraf 4.6 "Sådan tændes og slukkes Bestic". Controller at alle betjeningsenheder og oplader er fjernet, når Bestic transporteres eller sendes.

Kom ikke Bestic i en taske på hjul. Rystelser eller vibrationer fra denne form for transport kan beskadige hjælpemidlet.

Det anbefales at bruge en særlig rygsæk eller flytaske til transport af Bestic. Forsøg at undgå tryk og rystelser. Armen er særlig følsom over for vedvarende tryk.

6.2 Opbevaring


Af hensyn til vedligeholdelse skal batteriet i Bestic oplades mindst én gang om året i 3 timer, da batteriet i modsat fald kan tage skade. Opbevar hjælpemidlet i opretstående position på et plant underlag.

7. At spise med Bestic

Før du begynder at bruge Bestic, skal du have læst og forstået alle advarslerne i kapitel 2, Sikkerhed. Du bør også læse kapitel 4, Håndtering. Bestic bevæger sig ikke, før du giver den besked om det ved hjælp af betjeningsenheden.

7.1 Start

1. Anbring Bestic på et plant, stabilt underlag.
2. Anbring tallerkenen på det skridsikre underlag.
3. Anbring Bestic tæt på tallerkenen, så hjælpemidlet berører tallerkenen med sine "fødder".
4. Tilslut betjeningsenheden.
5. Tryk på den sorte knap på siden af Bestic for at tænde hjælpemidlet.
6. Gå gennem startmenuen (se afsnit 7.2 Startmenu)
7. Når skeen er i startposition, dvs. når armen er strakt ud og oppe i luften, skal du sætte skeen fast.

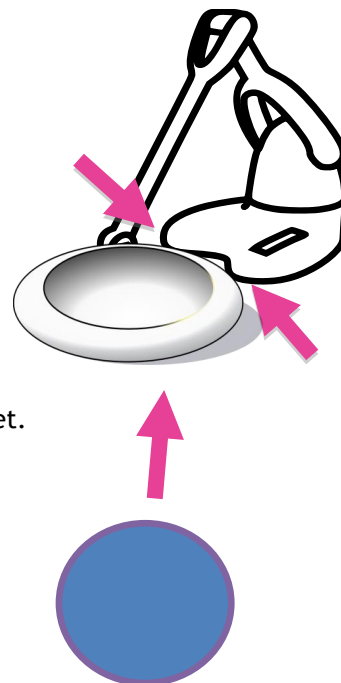


Skridsikker måtte, der skal placeres under tallerkenen.

7.2 Startmenu


Startmenuen vises i displayet, når Bestic tændes på den sorte tænd/sluk-knap, og når hovedmenuen forlades efter at have trykket på OK for Gem & exit.

7.2.1 Startmenu – med kun én bruger

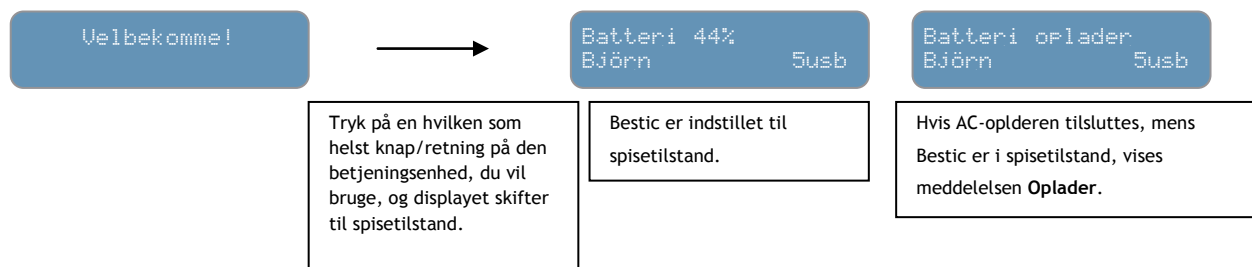


7.2.2 Startmenu – med flere brugere/profiler

Hvis du har flerbrugerindstillingen Multiple User Option på din Bestic, og du gerne vil vælge en anden bruger, skal du trykke på VENSTRE eller HØJRE for at skifte mellem brugere. Tryk på OK for at vælge bruger, f.eks. Anni-Frid.

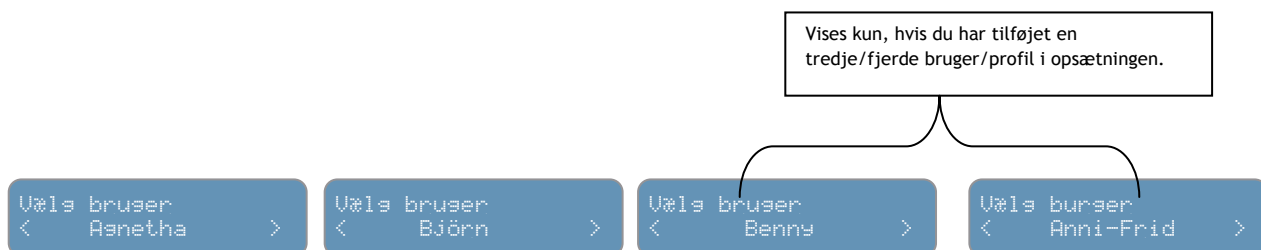

Tryk på OK, når du har valgt den relevante bruger:

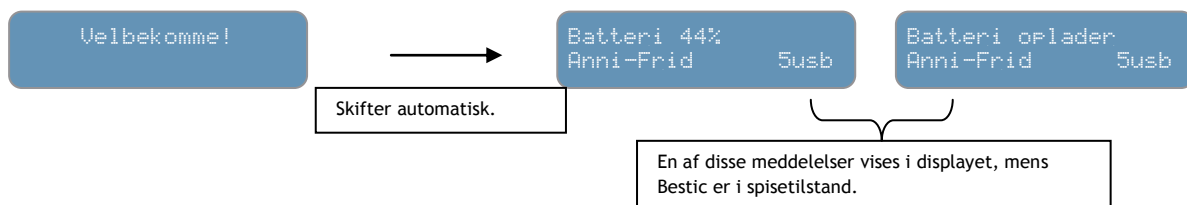

Med indstillingen Multiple User Option kan du gemme indstillinger for op til fire profiler. Disse profiler kan f.eks. være indstillinger for fire forskellige personer, eller det kan være fire forskellige indstillinger til forskellige steder, der gælder for én person; Hjemme, Skole, Forældre, TV-stue. Du kan også vælge at gemme to forskellige steder for to forskellige personer: Profil 1: A Frokost, Profil 2: A Aftensmad, Profil 3: B Frokost, Profil 4: B Snack. Hvis Bestic ikke har indstillingen Multiple User Option, er det kun muligt at gemme indstillinger for én person/profil. For at gøre det nemt har profilerne på forhånd fået navnene Agnetha, Björn, Benny og Anni-Frid, og det er så meningen, at de efterfølgende skal redigeres (se afsnit 8.3.1 Redigering og tilføjelse af brugere).

NB! Når **Velbekomme!** vises i displayet, kører skeen/armen til startposition, dvs. skeen kører op til brugerens mund alt efter de indstillinger, der er foretaget i **hovedmenuen**.
Vær opmærksom på denne bevægelse!



7.3 Betjeningsstilstande

Bestic Single TWO-STEP (2step) - *Gør det muligt for brugeren at styre skeen ved hjælp af en betjeningsenhed med enknapsfunktion.*

Når skeen er i startposition, skal du trykke på betjeningsenheden med enknapsfunktion for at få skeen til at køre ned til tallerkenen og skiftevis vende skubbesiden mod venstre og højre hver anden gang. Skeen kører i en buet bane hen over tallerkenen, indtil brugeren trykker på knappen. Du kan se køremønsteret på billedet til højre. Hvis brugeren ikke trykker på knappen, kører skeen langs den buede bane fem gange, hvorefter den stopper. Når brugeren trykker på knappen, begynder skeen at køre langs den buede bane igen. Når brugeren trykker på knappen, mens skeen kører tværs over tallerkenen, stopper skeen og kører mod den kant af tallerkenen, som skeens skubbeside har retning mod, og samler mad op, når den når kanten af tallerkenen. Derefter følger skeen samme mønster som beskrevet ovenfor for 5usb. Gentag dette mønster, indtil måltidet er færdigt. *Hvis brugeren trykker på knappen, før skeen har nået kanten, stopper den og skubber med det samme mad op (NB! Dette sker dog kun, hvis TWO-STEP er indstillet til 2 tryk (<2>) på opsætningslisten).*



Bestic Single ONE-STEP (1step) - *Gør det muligt for brugeren at styre skeen ved hjælp af en betjeningsenhed med enknapsfunktion.*

Når skeen er i startposition, skal du trykke på betjeningsenheden med enknapsfunktion for at få skeen til at køre ned til tallerkenen, hvorefter skeen tager en bid og løfter den op. Den kører derefter til kanten af tallerkenen for at skrabe eventuel overskydende mad af skeen, hvorefter den kører op til munden. Når den første bid er nået op til munden, skal brugeren trykke på knappen igen, hvorefter skeen gentager cyklussen ovenfor, dog skubber skeen mad op fra et andet sted på tallerkenen. Skeen udfører én spisecyklus efter hvert tryk på betjeningsenheden med enknapsfunktion, indtil den har været hele tallerkenen rundt. Når denne cyklus er udført, kører skeen hen til et mindre område midt på tallerkenen og kører derefter ud til kanten for at skubbe mad op, indtil Bestic slukkes. Dette gør det muligt for brugeren at få de sidste rester på tallerkenen med. Hvis maden skrabes ind på midten af tallerkenen, vil den blive samlet op af skeen. Du kan se skubbemønsteret på billedet til højre.



5usb - *Gør det muligt for brugeren at styre skeen i en hvilken som helst retning på tallerkenen.*

Tryk på HØJRE eller VENSTRE for at køre skeen ned til tallerkenen. Hvis du trykker på HØJRE, vendes skeens skubbeside mod højre og omvendt. Når skeen når tallerkenen, forbliver den ubevægelig, indtil du trykker på en af retningsknapperne på betjeningsenheden; OP/NED/HØJRE/VENSTRE. Tryk på OK for at samle mad op. Skeen skubber derefter maden op, løftes op fra tallerkenen, ryster overskydende mad af, skraber maden af mod kanten og kører derefter op til munden. Når du har trykket på OK, skal du således

først spise maden på skeen, før du sender flere signaler til Bestic. Tryk, når skeen skal køre ned til tallerkenen igen.

4usb - Fungerer på samme måde som 5usb ovenfor, bortset fra at OK-signalet kommer fra en betjeningsenhed med enknapsfunktion. De fire retningssignaler for OP/NED/HØJRE/VENSTRE kommer fra en betjeningsenhed, der er sluttet til USB-porten, og OK-signalet kommer fra en betjeningsenhed med enknapsfunktion, der er sluttet til jackstikket. OK-kommandoen genererer de samme signaler som beskrevet ovenfor for 5usb.

NB! Når en betjeningsenhed med enknapsfunktion sluttes til Bestic, kan du bruge denne knap til at tænde Bestic, dvs. i stedet for at trykke på den sorte tænd/sluk-knap. Det er vigtigt at være opmærksom på denne egenskab ved betjeningsenheden med enknapsfunktion for at undgå, at brugeren bliver forskrækket, hvis Bestic starter, fordi brugeren ved et uheld er kommet til at trykke på knappen.

Derfor skal du også sørge for, at du ALTID frakobler betjeningsenheder fra Bestic, når hjælpemidlet transporteres rundt eller stilles væk til opbevaring. Placer aldrig Bestic i en rygsæk/æske eller tilsvarende med en betjeningsenhed tilsluttet, da dette kan tænde Bestic, så den går i gang.



5usb <i>Betjeningsenhed med femknapsfunktion</i>	4usb <i>Betjeningsenhed med femknapsfunktion med deaktiveret OK-funktion + betjeningsenhed med enknapsfunktion</i>	2stp <i>Betjeningsenhed med enknapsfunktion</i>	1stp <i>Betjeningsenhed med enknapsfunktion</i>
 	 +   +   + 		

7.4 Skift mellem forskellige betjeningsenheder/betjeningstilstande

Både jackstikket og USB-stikket kan være tilsluttet samtidig. Hvis du vil skifte mellem forskellige betjeningsenheder, f.eks. fra 5usb til 2stp, skal du blot trykke på den enhed, du vil bruge (forudsat at du har tilsluttet den), og Bestic reagerer på signalet fra denne betjeningsenhed. Hvis du f.eks. har brugt Bestic Picasso MINI (5usb) og gerne vil skifte til betjeningsenheden med enknapsfunktion og bruge Bestic Single TWO-STEP (2stp), skal du trykke på betjeningsenheden med enknapsfunktion, hvorefter skiftet automatisk sker i displayet.




Betjeningsenheden med enknapsfunktion er nu tilsluttet og kan bruges til betjening af Bestic. Hvis du vil skifte tilbage til betjeningsenheden med fem knapper, gør du det ganske enkelt ved at trykke på den, hvorefter den skifter tilbage til 5usb:




8. Menuer og indstillinger

Denne vejledning giver dig instruktioner i, hvordan du navigerer i menuerne med en betjeningsenhed, der har fem knapper (Bestic Picasso MINI). Du kan finde oplysninger om, hvordan du bruger andre betjeningsenheder, f.eks. joysticks, i brugervejledningen til den betjeningsenhed, du anvender. Bestic er opbygget omkring to menuer: startmenuen og hovedmenuen. For at skifte mellem de øverste niveauer i hovedmenuen og startmenuen skal du scrolle vandret (VENSTRE ELLER HØJRE). Hovedmenuen indeholder lister med forskellige indstillinger. Du kan scrolle gennem listerne ved hjælp af de fire retninger på betjeningsenheden med de fem knapper: lodret for at gå OP og NED og vandret for at gå til VENSTRE eller HØJRE.

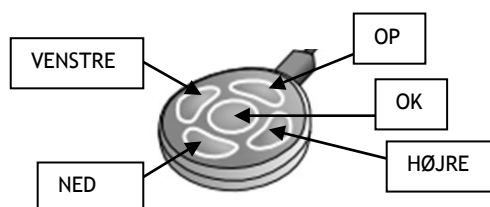

En mere detaljeret beskrivelse af Bestic Picasso MINI, herunder sikkerhedsanvisninger, findes i Bilag 1 i denne vejledning.

8.1 Symboler og forkortelser i menuerne

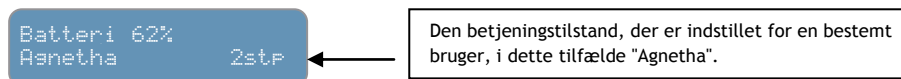

- 5usb** Angiver, at du bruger en betjeningsenhed med fem knapper til at styre Bestic via USB-tilslutningsporten.
- 1stp** Angiver, at du bruger en betjeningsenhed med enknapsfunktion til at styre Bestic ved hjælp af betjeningsstilstanden Bestic SINGLE ONE-STEP via tilslutningsporten til jackstik.
- 2stp** Angiver, at du bruger en betjeningsenhed med enknapsfunktion til at styre Bestic ved hjælp af betjeningsstilstanden Bestic SINGLE TWO-STEP via tilslutningsporten til jackstik.
- 4usb** Angiver, at du bruger et joystick eller lignende og har deaktiveret OK-knappen og tilsluttet en betjeningsenhed med enknapsfunktion til at vælge OK. Denne betjeningsmåde er mest almindelig med et hagejoystick eller betjeningsenheden "Moozi" for at eliminere risikoen for, at brugeren ved et uheld kommer til at trykke på OK. Joysticket tilsluttes via USB-tilslutningsporten, og betjeningsenheden med enknapsfunktion tilsluttes via tilslutningsporten til jackstik.
- *** Angiver, at du skal trykke på OK, hvis du vil vælge denne indstilling. Hvis du ikke vil vælge den angivne indstilling, skal du blot trykke på OP/NED for at gå til den tidligere eller næste indstilling på listen. Symbolet vises for følgende indstillinger:

Tilpas ske	Opret bruger
Flere valg	Slet bruger
Tilbage	Service
Gem & exit	


- < >** Angiver, at du kan ændre en værdi/indstilling ved at trykke på knappen HØJRE eller VENSTRE. Hvis værdien i displayet er <32>, kan du ved at trykke på HØJRE øge værdien til <33>, og ved at trykke på VENSTRE kan du sænke værdien til <31>. Det samme gælder, når du skifter mellem brugere (< Agnetha >)/ Ja og Nej (< Ja>/< Nej>) og andre specialindstillinger.

8.2 Hovedmenuen


Hovedmenuen er det sted, hvor du foretager alle indstillinger for din spise hjælpemiddel, samt indstillingerne for hver enkelt bruger. For at åbne hovedmenuen skal du trykke på den sorte tænd/sluk-knap på Bestic hjælpemidlet i mindst 2 sekunder, indtil følgende vises i displayet:


```
Til hovedmenu?  
<      Nej      >
```

Skift mellem Ja og Nej ved hjælp af højre og venstre knap på betjeningsenheden. Scroll frem til Ja, og foretag dit valg ved at trykke på OK, hvorefter du får adgang til hovedmenuen:

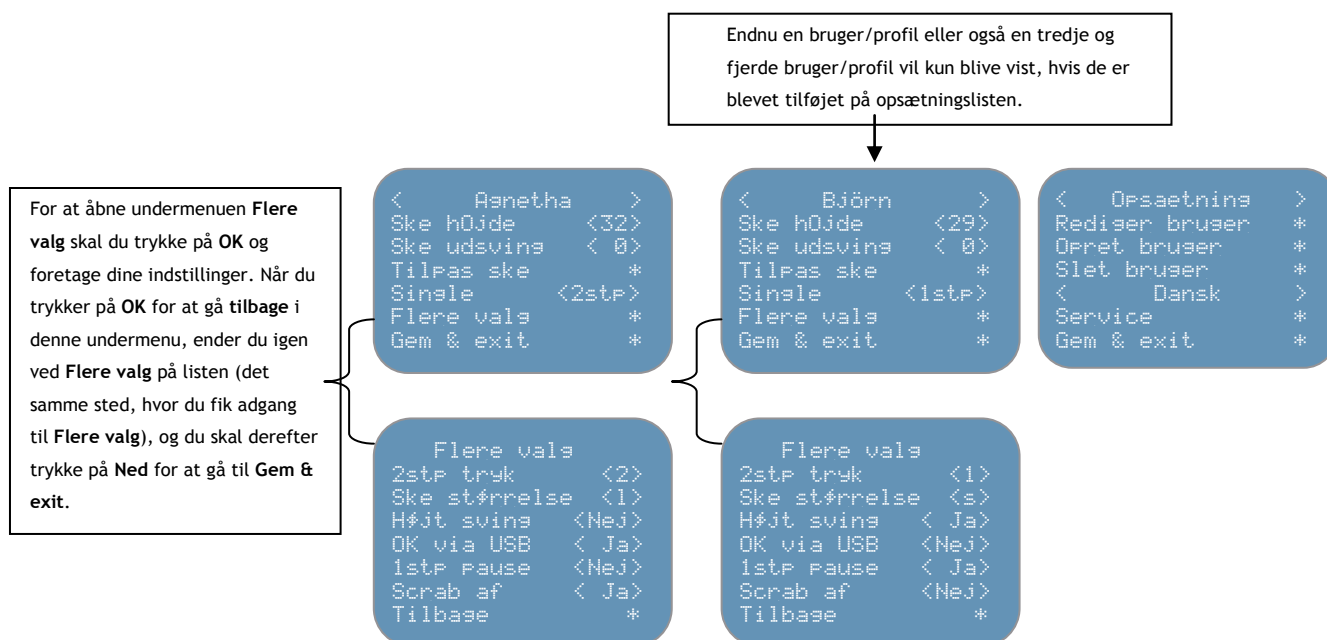


TIP! Alle lister er forbundet øverst/nederst og danner et "hjul". Hvis du har foretaget justeringer af skeens højde og ikke har behov for at foretage yderligere justeringer, betyder det, at du bare kan trykke to gange, hvorefter du med det samme ender nederst på listen ved **Gem & exit**, og at du dermed slipper for at skulle scrolle hele vejen ned gennem listen.

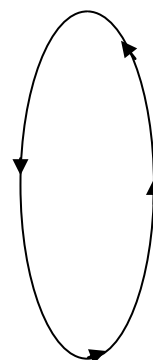

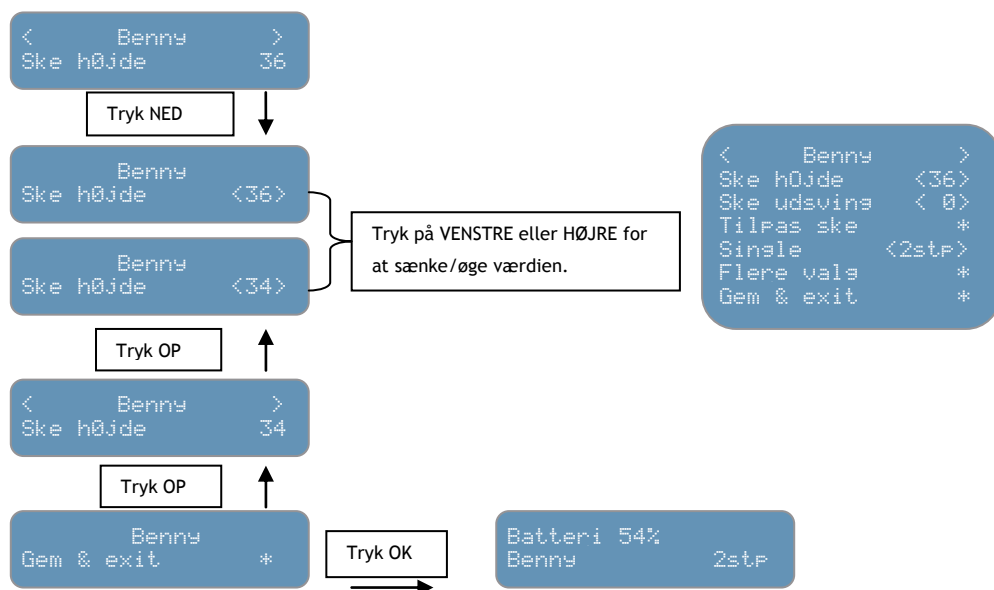

8.2.1 Personlige indstillinger

For at foretage personlige indstillinger for brugerprofilen "Björn" skal du scrolle til VENSTRE/HØJRE, indtil Björn vises i displayet:

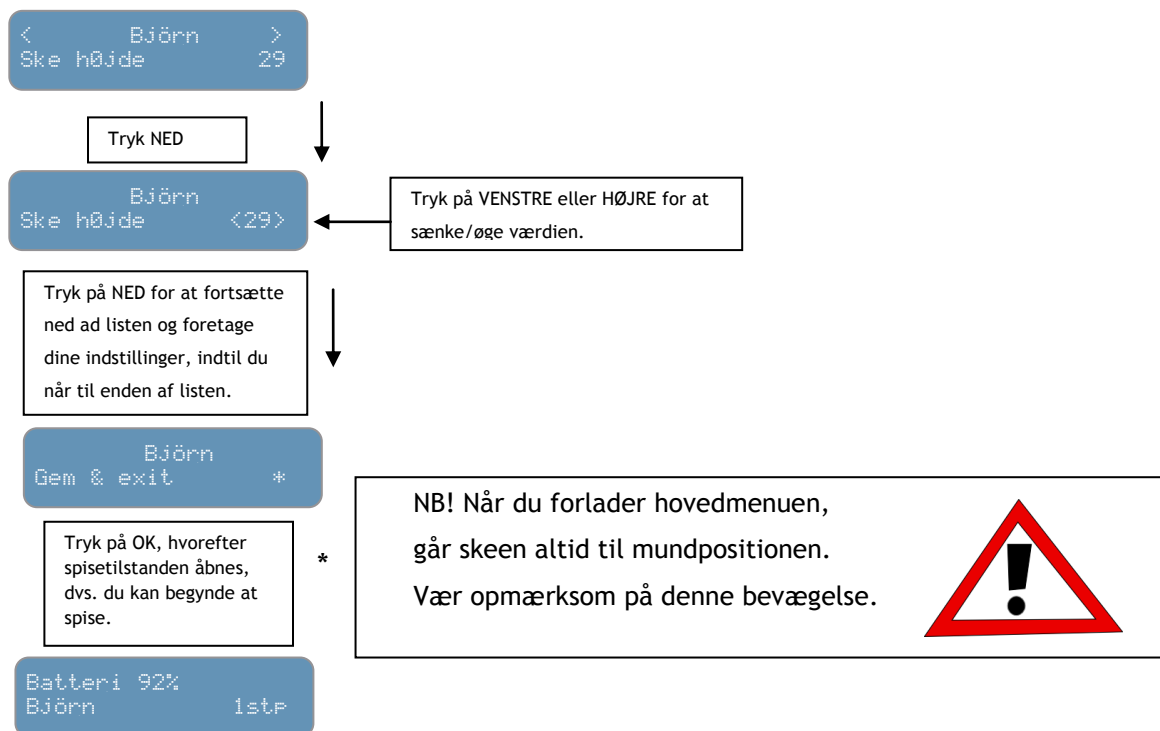

Ske højde

Denne indstilling bestemmer skeens/Bestic armens højde over tallerkenen. Værdien kan øges eller sænkes alt efter brugerens præferencer. Indstil skeens højde, så brugeren indtager en behagelig spisestilling ved køkkenbordet (eller det sted, hvor brugeren plejer at spise). Hvis brugerens næse f.eks. kommer i vejen for skeen, skal du prøve at øge skeens højde med nogle få centimeter. Du kan finde yderligere oplysninger i de tekniske specifikationer til Bestic.

Ske udsving

Denne indstilling bestemmer skeens position i forhold til brugerens mund i serveringspositionen for at komme så tæt på munden som muligt. Ved at øge værdien flyttes skeen tættere ind mod brugeren. Hvis denne værdi ændres, skal det gøres efter aftale med brugeren. Du kan finde yderligere oplysninger i de tekniske specifikationer til Bestic.

Tilpas ske

Hvis du gerne vil teste de indstillinger, du netop har foretaget, skal du trykke på OK. Skeen/armen kører til startpositionen, og hvis positionen er tilfredsstillende for brugeren, skal du trykke på NED for at gå nedad på listen. Hvis du vil justere indstillingerne, skal du trykke på OP for at gå til Ske højde og/eller Ske udsving, foretage de nye indstillinger og derefter afprøve dem igen. Skeens position er meget vigtig for, at brugerens spiseoplevelse skal blive så god som muligt. Indstillingerne kan ændres lige så mange gange, der er behov for det.



Single

Standardindstillingen er Bestic Single TWO-STEP (<2stp>), tryk på VENSTRE eller HØJRE for at skifte til Bestic Single ONE-STEP.

Flere valg

Tryk på OK for at åbne undermenuen **Flere valg** (du kan finde nærmere oplysninger nedenfor).

Gem & exit

Tryk på OK, eller brug OP/NED for at gå gennem listen igen. Når du trykker på OK, vises beskeden **Velbekomme!** i displayet, og Bestic er klar til brug.

Flere valg

2 step tryk

To tryk (<2>) er standardindstillingen for betjeningstilstanden Bestic Single TWO-STEP. Det betyder, at du kan trykke igen, før skeen når til kanten af tallerkenen og samler mad op. Hvis du f.eks. trykker

én gang, kører skeen ned til tallerkenen og begynder at køre op og ned på tallerkenen. Tryk igen for at få skeen til at begynde at køre hen mod kanten. Hvis du trykker tredje gang, vil skeen samle mad op med det samme i stedet for at begynde at skubbe maden helt hen til kanten. Hvis du vælger 1 tryk (<1>), får du ikke mulighed for at trykke en tredje gang.

Ske størrelse

Skift standardindstillingen Large (<L>) til small (<s>), hvis du spiser med en lille ske.

Højt sving

Standardindstillingen er Nej (<Nej>), hvilket betyder, at skeen kører i et bevægelsesmønster som en nedadgående og opadgående bue fra tallerkenen til munden og tilbage igen. Hvis du skifter til Ja (<Ja>), kører skeen lige op fra tallerkenen, og når den når op til mundhøjde, begynder den at køre ind mod brugeren. På vejen tilbage til tallerkenen bakker den først vandret tilbage, indtil den er placeret over tallerkenen, hvorefter den kører ned. Dette er specielt nyttigt for brugere, der styrer Bestic med hagen, fordi man undgår, at skeen kommer i vejen for joysticket på vejen ned til tallerkenen.

OK via USB

Standardindstillingen er Nej (<Nej>). Hvis du vælger Ja (<Ja>), er det muligt at styre Bestic i en hvilken som helst retning ved hjælp af en betjeningsenhed med 5 knapper (et joystick) sammen med en separat OK-knap, der er tilsluttet i "jackstikket". Det betyder, at den sædvanlige OK-funktion på joysticket er deaktiveret. Denne fremgangsmåde er primært beregnet til brug sammen med et "MINI-joystick med skubbefunktion", når der styres med hagen. Fordelen er, at du kan bruge joysticket til de fire retninger og derefter tilføje en separat enknapsfunktion ud for hovedet, som kan bruges til at bekræfte med. **Vigtigt! Hvis du har valgt "OK via usb", skal du være opmærksom på, at du altid skal have en betjeningsenhed med enknapsfunktion tilsluttet for at kunne aktivere OK-kommandoen.**

1stp pause

Standardindstillingen for Bestic Single ONE-STEP (1stp) er Nej (<Nej>). Hvis du vælger Ja (<Ja>), holder skeen en pause ved brugerens mund. Dette er især en hjælp for brugere med ufrivillige bevægelser (f.eks. brugere, der har svært ved at holde med at trykke på betjeningsenheden med enknapsfunktion). Pausen betyder, at skeen i de 13 sekunder, hvor den er oppe ved brugerens mund, ikke kører ned til tallerkenen, uanset hvor mange gange der trykkes på betjeningsenheden med enknapsfunktion i løbet af de 13 sekunder.

Skrab af


Ja (< Ja>) er standardindstillingen for Skrab af. Det betyder, at skeen altid kører til kanten af tallerkenen for at skrab eventuel overskydende mad af underneden. Hvis du gerne vil deaktivere denne funktion, skal du ændre indstillingen til Nej (<Nej>).

Tilbage

Tryk på OK for at gå tilbage til listen (du vil igen ende ved indstillingen **Flere valg**, hvor du blot skal trykke på NED for at gå til næste indstilling på listen).

Hvis brugeren oplever, at indstillingerne ikke er optimale, er det altid muligt at åbne hovedmenuen og redigere indstillingerne.

8.2.2 Generelle indstillinger for Bestic spise hjælpemiddel

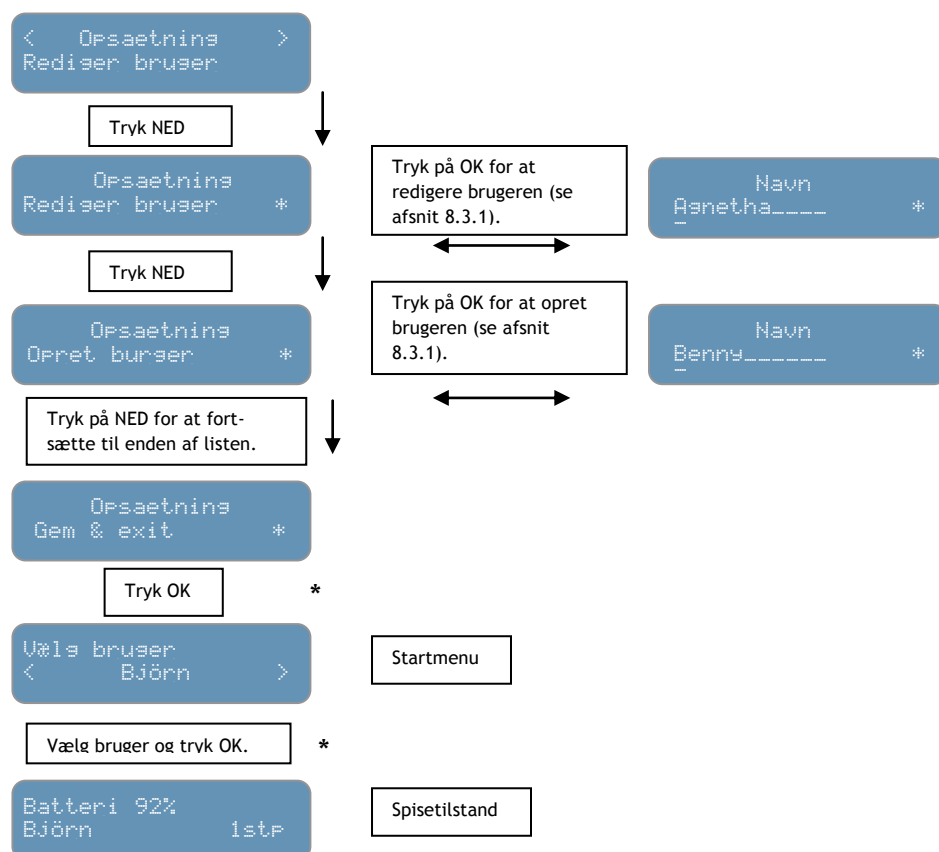

Rediger bruger

Hvis du gerne vil tildele brugerens navn til brugerens personlige indstillinger, kan du gøre det her (du kan finde nærmere oplysninger i afsnit 8.3 "Bogstaver, tal og specialtegn"). Der kan maks. være 11

tegn i et navn, inkl. mellemrum eller bindestreger. F.eks. indeholder *Anni-Frid* 9 tegn og *Bjorn Borg* 10 tegn.

Opret bruger

Denne indstilling vises kun, hvis du har indstillingen "Multiple User Option". Du tilføjer en bruger ved at trykke på OK. Du kan vælge at redigere brugeren med det samme eller beholde Agnetha/Björn/Benny/Anni-Frid. Du kan altid gå tilbage og redigere en bruger.

Slet bruger?

Denne indstilling vises kun, hvis du har valgt indstillingen "Multiple User Option". Du fjerner en bruger ved at trykke på OK. Du skal bekræfte fjernelsen. Hvis du har mere end én bruger, bliver du bedt om først at vælge, hvilken bruger du vil fjerne. Du kan skifte mellem brugere ved at trykke på VENSTRE eller HØJRE og trykke på OK, når den bruger, du vil fjerne, vises i displayet.

<Dansk>

Tryk på VENSTRE eller HØJRE for at vælge sprog. Sproget ændres med det samme. Du skal blot trykke på NED for at fortsætte nedad på listen, når du har foretaget dit valg. NB! Displaytekstsproget indstilles for hele hjælpemidlet, ikke for den enkelte bruger, og det er derfor kun muligt at have ÉN sprogindstilling pr. Bestic spisehjælpemiddel. Hvis du har en svensktalende bruger og en finsktalende bruger, betyder det med andre ord, at du skal vælge enten svensk eller finsk som displaytekstsprog.

Service

For at åbne servicemenuen skal du have adgang til en speciel kode, som kun er tilgængelig for teknisk personale, der har fået instruktioner i brugen. Hvis du ved et uheld kommer til at trykke OK på serviceindstillingen og ender her:



skal du blot trykke på OK igen for at komme tilbage til opsætningslisten.

Gem & exit

Tryk på OK for at gemme dine indstillinger. Du vil da blive sendt videre til startmenuen, hvor du skal vælge bruger igen. Hvis du har åbnet opsætningen, mens en person var i gang med at spise med Bestic Single ONE-STEP, fortsætter skeen på samme sted i "spisecyklussen", som den befandt sig, da cyklussen blev afbrudt.


8.3 Bogstaver, tal og specialtegn

Alle bogstaver, tal og specialtegn er opbygget som to lange lister, der forbindes i "enderne". Der er to forskellige lister, afhængigt af om du ønsker at bruge store eller små bogstaver. Den første række med store bogstaver er standard. Tryk på OK for at få adgang til den anden række med små bogstaver (å og ö findes kun som små bogstaver). **Antallet af tegn, der kan bruges til et navn, er begrænset til 11, inkl. mellemrum eller bindestreger; f.eks. indeholder Anni-Frid 9 tegn og Björn Borg 10 tegn.**

8.3.1 Redigering og tilføjelse af brugere



Den blinkende firkant angiver, at dette bogstav er "aktivt", dvs. at det er dette bogstav, du kan ændre. For at ændre navnet "Agnetha" til "Björn" skal du scrolle én gang op for at komme frem til "B". For at flytte hen til "g" skal du trykke på HØJRE, og firkanten flytter hen til næste bogstav. Tryk på OP, indtil du når frem til "J". For at ændre bogstavet til lille "j" skal du trykke på OK én gang. Tryk på HØJRE igen for at gøre "n" aktivt og derefter ændre dette til "ö". Fortsæt, indtil du har indtastet "Björn". Da der er to bogstaver mere i Agnetha end i Björn, skal du fjerne "h" og "a" i slutningen. Det gør du ved at finde mellemrumstegnet på listen. Når displayet viser "Björn", skal du trykke på HØJRE, indtil * er aktiv, og derefter trykke på OK for at gå tilbage til opsætningslisten. Du kan naturligvis også bruge tal og bogstaver og skrive f.eks. "Björn 2".

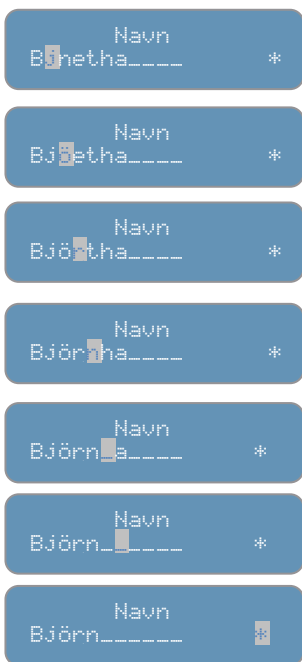


Liste		
1	2	
	ö	} "ö" og "å" er kun tilgængelige som små bogstaver.
	å	
Z	z	} Osv. går helt op til "a".
A	a	
		Mellemrum
.	.	Tegnsætning
-	-	Bindestreg
9	9	} Osv. går helt op til "0".
0	0	
	ö	Tilbage til begyndelse/ende af listen.

Bilag 1 - Sådan anvendes betjeningsenheden Bestic Picasso MINI

Kompatibel med Bestic software fra version: 1.01


Requirements:

1. Bestic hovedenhed
2. Bestic Picasso MINI
3. USB-ledning

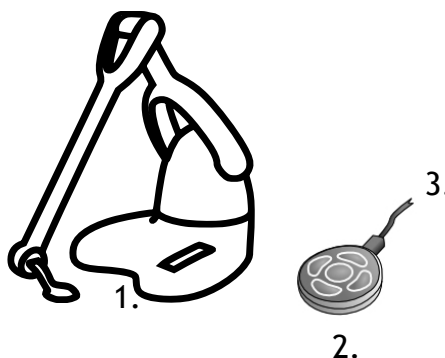

Opsætning:

1. Tilslut USB-ledningen til Bestic Picasso MINI som vist på billedet ovenfor. Bemærk, at USB-ledningen har forskellige stikstørrelser i hver ende. Det lille stik er til Bestic Picasso MINI.
2. Tænd for Bestic hovedenheden ved at trykke på den sorte knap.
3. Sæt den anden ende af USB-ledningen i Bestic. NB! Sørg for, at de to huller på USB-stikket vender opad. (Se illustration).
4. Mens du går fra menu til menu og spiser med Bestic, kan du ved hjælp af retningspilene på Picasso MINI ændre værdierne og styre skeen. Brug den runde knap i midten til OK og til at samle mad op.

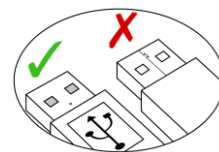

Du kan skifte USB-ledningen (USB A til USB mikro B) til ledning med en anden længde end standardledningen på op til 2 m. Disse ledninger kan købes i en butik, der forhandler computerudstyr.

Rengøringsanvisninger:

Hjælpe midlet skal rengøres med en fugtig klud efter behov.

Sikkerhedsinformation vedrørende Bestic Picasso MINI

- Må ikke bruges i kontakt med vand.
- Må ikke bruges tæt på åben ild.
- Må ikke åbnes.



Bilag 2 - Serveringstips

Bestic kan håndtere mad, der er nem at samle op med en ske. Dette inkluderer f.eks. sammenkogte retter, yoghurt, grød, ris, makaroni og andre fødevarer, der kan skæres i små bidder, som er små nok til skeen. Mad, der er vanskelig at samle op, er f.eks. pizza, hele sandwicher, spaghetti, etc.

- Undgå at servere maden i en stor "bunke" midt på tallerkenen, da det er her, skeen altid går ned først, og det vil derfor gøre det vanskeligt for skeen at samle maden op.
- Det er bedre at servere en ny portion mad i stedet for at øse en stor portion op på tallerkenen med det samme.
- Lad brugeren selv bestemme, om maden skal breddes ud forskellige steder på tallerkenen, eller om han/hun foretrækker, at kartofler/ris/pasta breddes ud først, hvorefter kød/fisk/bælgfrugter og sovs kommes ovenpå. Man behøver IKKE at blande alle fødevarerne sammen på tallerkenen, hvis brugeren ikke ønsker det. Sørg for, at serveringen ser appetitlig ud!
- Hvis maden er meget tyk, som f.eks. kartoffelmos, kan store klumper mos sidde fast på skeen. Prøv at lave mosen mindre tyk, hvis det er muligt.

Betjeningstilstand Bestic Single ONE-STEP (1stp)

Ved brug af ONE-STEP skal maden breddes jævnt ud på tallerkenen. Laget skal være under 2,5 cm tykt.

Betjeningstilstand Bestic Single TWO-STEP (2stp)

Da skeen bevæger sig frem og tilbage i midten, skaber det en "bane" midt på tallerkenen. Det er en god idé at servere maden, så skeen nemmere kan bevæge sig.

Undlad at placere drikkeglas, blomstervaser, lysestager osv. tæt ved tallerkenkanten for at undgå, at skeen/armen rammer disse genstande, så de vælter.



Bilag 3 - Bemærkninger til personlige indstillinger

Bruger 1: _____

Ske højde : _____

Ske udsving: _____

Single: _____

Opsætning

2 stp tryk: _____

Ske størrelse: _____

Højt sving: _____

OK via USB: _____

1 stp pause: _____

Skrab af: _____

Bruger 3: _____

Ske højde : _____

Ske udsving: _____

Single: _____

Opsætning

2 stp tryk: _____

Ske størrelse: _____

Højt sving: _____

OK via USB: _____

1 stp pause: _____

Skrab af: _____

Bruger 2: _____

Ske højde : _____

Ske udsving: _____

Single: _____

Opsætning

2 stp tryk: _____

Ske størrelse: _____

Højt sving: _____

OK via USB: _____

1 stp pause: _____

Skrab af: _____

Bruger 4: _____

Ske højde : _____

Ske udsving: _____

Single: _____

Opsætning

2 stp tryk: _____

Ske størrelse: _____

Højt sving: _____

OK via USB: _____

1 stp pause: _____

Skrab af: _____

Bilag 4 - Andre bemærkninger

Bilag 5 - Korrekt indsæt af USB og afmontering af skeen

