

# REHACOM

## Software til kognitiv genoptræning

---



### Beskrivelse

RehaCom er højt specialiseret software, der hjælper terapeuten med at tilrettelægge et individuelt tilpasset træningsprogram for patienter med kognitive funktionsnedsættelser, så patienten hurtigere kan genvinde tabte færdigheder inden for opmærksomhed, hukommelse, eksekutive funktioner, visuel hukommelse og perception.

### Målgruppe

RehaCom træningsmoduler understøtter behandlings- og genoptræningstilbud til mange forskellige neurologiske, neurodegenerative og neuropsykiatriske lidelser herunder: apopleksi, TBI, Sklerose, Demens/Alzheimer, Psykiske lidelser, Geriatri, ADHD etc.

### Valg af terapimoduler

Der er nu 29 RehaCom terapimoduler tilgængelige. Hvert terapimodul har hundredvis af opgaver med forskellige sværhedsgrader: fra meget lette til meget komplekse opgaver. RehaCom kan bruges fra den akutte fase til selvtræning i eget hjem i tæt samarbejde med terapeuten.

### Screening af patienten

RehaCom tilbyder ni screeningmoduler til at teste patientens kognitive funktioner. Screeningsmodulerne sammenligner patientens resultater med raske mennesker af samme køn og alder. Som et resultat af testen anbefaler RehaCom et træningsforløb med specifikke terapimoduler, der passer til patientens niveau.

---

**CAREWAREKOMPAGNIET**

[www.carewarekompagniet.dk](http://www.carewarekompagniet.dk)

[os@carewarekompagniet.dk](mailto:os@carewarekompagniet.dk)

+45 72 44 42 48

# REHACOM

## Software til kognitiv genoptræning

---

### Adaptiv

RehaCom er et adaptivt program, der tilpasser hver opgaves kompleksitet og sværhedsgrad til patientens funktionsniveau. Programmet giver patienten en "helt tilpas" udfordring, hvor kravene hverken er for høje eller for lave. Det gør træning med RehaCom motiverende og frustration undgået.

### Træning på sit modersmål

Træningsmodulerne kan tilpasses i forhold til patientens familiebaggrund, erhverv eller personlige præferencer. Derudover er hvert træningsmodul tilgængeligt på over 21 sprog, så patienten kan træne på sit modersmål.

### Motiverende selvtræning

Før en træningssession starter introducerer terapeuten patienten for opgaven. RehaCom understøtter denne introduktion med instruktioner og vejledninger til hver ny session. Under træningen fungerer RehaCom som en neutral observatør og registrerer patientens reaktionstider, antal rigtige etc. og giver objektiv feedback undervejs for at styrke patientens motivation og selvtillid.

### Kliniske retningslinier for træningstiden:

- flere gange om dagen i 10-15 minutter i den akutte fase
- 30-45 minutter mindst 3-5 gange om ugen i de følgende 6-8 uger
- 3-5 gange om ugen i ca. 3-5 måneder i den senere fase af rehabiliteringen.

### Superviseret hjemmetræning via internettet

Patienten kan fortsætte sin daglige træning hjemmefra via internettet. Når patienten vil træne downloader RehaCom det individuelt tilpassede træningsmodul til PC'en og gemmer automatisk træningsresultatet efter hver øvelse. Umiddelbart herefter kan terapeuten følge træningsforløbet og supervisere patienten.


### Faglig udvikling: virker det?

RehaCom gemmer automatisk alle screenings- og træningsresultater. Resultaterne kan følges på patientens 'Side', hvor den træningsansvarlige kan følge klientens arbejdsindsats og udvikling over tid inden for enkelte øvelser eller inden for en enkelt kognitiv funktion. Alle resultater kan udskrives til dokumentation og bruges internt til evaluering af forskellige indsatser.

### Videnskabeligt og evidensbaseret

Fagpersonale over hele verden arbejder med og anbefaler RehaCom. Alle procedurer i RehaCom er udviklet i tæt samarbejde med forskere og terapeuter og modulerne bliver kontinuerligt evalueret, udviklet og tilpasset.

Videnskabelige studier dokumenterer effekten og er tilgængelige på [www.carewarekompagniet.dk](http://www.carewarekompagniet.dk)

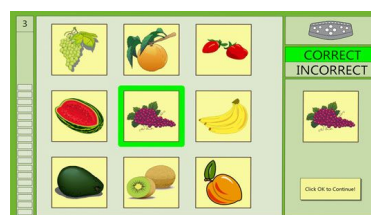

---

**CAREWAREKOMPAGNIET**

[www.carewarekompagniet.dk](http://www.carewarekompagniet.dk)

[os@carewarekompagniet.dk](mailto:os@carewarekompagniet.dk)

+45 72 44 42 48